

## Användarinstruktion Evac Aid

1. Öppna kranen på luftflaskan som finns inne i ben-delen. Under tiden som båren blåses upp, plocka ur alla remmar och förbered båren för användning



2. Placera personen i båren. Huvudet placeras mot den rundade delen och benen placeras med underbenen utanför bårens nederkant



3. Bröstrom.  
Träs under armar och fästs över bröst, remmen sitter inne i båren och är en extra säkerhetsrem främst för vertikala lyft



4. Benremmar, blå markering, dras mellan benen och kopplas till blåmarkerade fästen. Drag åt så att benen kommer upp i rät vinkel



5. Rem med kardborreband för fixering av benen. Fästs över benen. Trä genom ringen på sidan och fäst med kardborreband, för att undvika att benen åker åt sidorna



6. Dra ihop båren med hjälp av svart rem mitt på för ett fixerat läge.



7. Använd dragremmarna för att dra båren över golv, och nedför trappor. Dragremmarna fästs med karbinhakar i bårens fyra hörn. Vid brantare trappor rekommenderas två personer för att manövrera båren och undvika tippling.



8. Efter användning fyll luftflaskan ( 200 bars lufttryck ) och återställ båren.

En enklare instruktionsfilm finns på vår hemsida. [www.vibso.se/instruktion.htm](http://www.vibso.se/instruktion.htm)